

## INSTRUÇÕES PARA A COLHEITA E ENVIO DE AMOSTRAS

1. Marcar cada tubo com nome e data de nascimento para uma identificação inequívoca;
2. As colheitas devem sempre ser feitas em condições de estrita esterilidade, de preferência usando tubos de vácuo;
3. **Colher cerca de 10mL de sangue** em 1 ou mais tubos estéreis com **EDTA** (p.ex. Vacutainer de tampa roxa);
4. Para estudos em crianças com menos de 10 anos, colher cerca de 5mL de sangue;
5. **Manter as amostras à temperatura ambiente;**
6. **Para estudos de Neurofibromatose 1, pedidos com mais do que 1 teste e para estabelecimento de linhas celulares, colher 10mL de sangue adicionais;**
7. **Para consultas ou Serviços de Genética:**
  - Testes Pré-sintomáticos e de Diagnóstico Pré-Natal:
    - é necessária a existência de confirmação molecular na família. Caso esse estudo não tenha sido realizado no nosso laboratório enviar, por favor, cópia do relatório;
    - deverão ser feitas previamente consultas de aconselhamento genético e avaliação psico-social;
    - é indispensável o envio de um consentimento informado específico;
    - no caso particular de Diagnóstico Pré-Natal:
      - o laboratório deverá ser contactado previamente ao envio da amostra;
      - as amostras deverão ser enviadas para o laboratório o mais rapidamente possível após colheita;
      - enviar vilosidades coriônicas em meio de transporte adequado com antibiótico e antifúngico e soro vitelofetal (ex. AmnioMAX) ou líquido amniótico (pelo menos 3mL em tubo estéril);
      - amostra de sangue de cada um dos progenitores;
8. A amostra deverá ser devidamente acondicionada e a embalagem (com a amostra e documentos) deverá indicar: “manter à temperatura ambiente”; “urgente - material biológico perecível”; “sangue não infeccioso para uso laboratorial”.



### Morada para envio das amostras

Centro Genética Preditiva e Preventiva - CGPP, IBMC  
Rua do Campo Alegre, 823  
4150 - 180 PORTO

Em caso de dúvida, por favor contacte-nos:

Tel.: 226 074 942  
Fax: 226 002 923  
Email: [cgpp@ibmc.up.pt](mailto:cgpp@ibmc.up.pt)